

## ForgetMeNot - réf.: FMNY2B (jaune) ou FMNB2B (bleu)


Une réponse simple à un vrai problème\*: le garrot de doigt ForgetMeNot

Disponible en jaune ou en bleu

Réutilisable

Vendu en paquet de 10 unités

Vendu non stérile

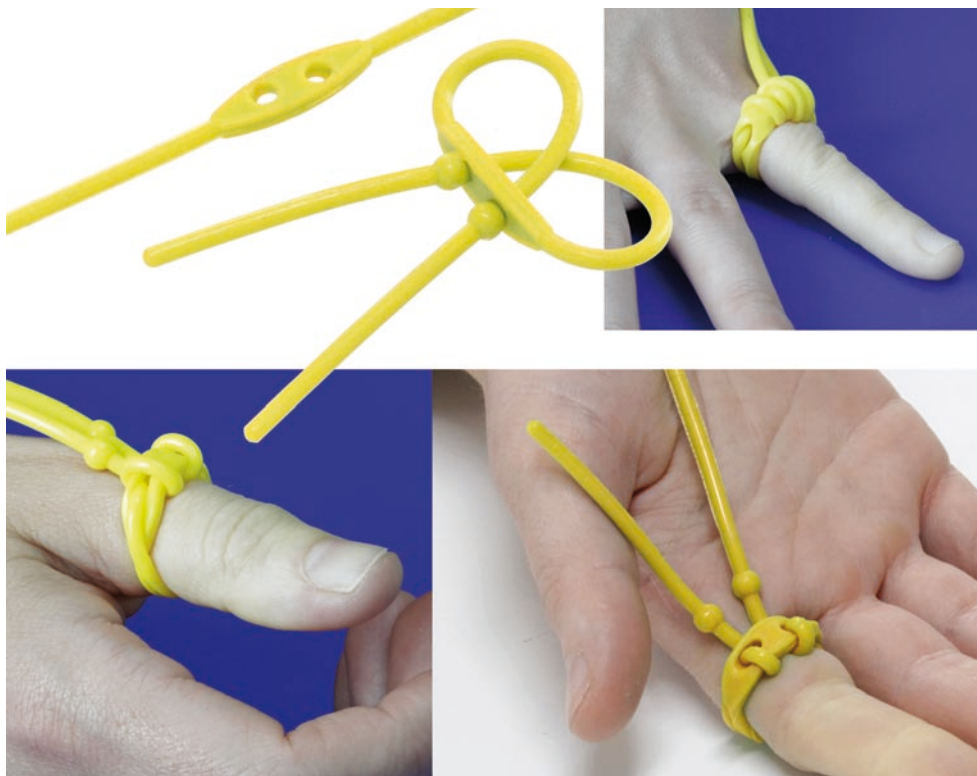

\* Résultats fonctionnels à long terme d'ischémies digitales sous garrot: à propos de 2 observations.  
SOFcot 2010 / Florence Mallard (Angers) Julien Richou, Dominique Le Nen



### Vidéo: Exsanguination d'un doigt avec ForgetMeNot

par Stéphanie Gouzou - Hospital Universitaire de Strasbourg

**CLIQUER ICI**

<http://www.arex.fr/QRC.php?c=23>



Fabricant:  
AREX®  
3 allée du Clos Tonnerre  
91120 Palaiseau - FRANCE

[www.arex.fr](http://www.arex.fr)

Design+photo: e-montceaux.fr / Réf. 193 éd.06 - © AREX® - 2020

## ForgetMeNot

Conçu et fabriqué pour cette seule indication: garrot de doigt réutilisable.

Réutilisable

Taille unique


Permet de réaliser une exsanguination totale du doigt

Peut être enlevé sans avoir à repasser sur la plaie digitale


et sans risquer de couper le peau

Pour une utilisation optimale, prière de suivre les conseils d'utilisation ci-dessous. La mise en place du garrot de doigt FMN est simple et reproductible. Cela se fera sous anesthésie locale ou locorégionale.

1. Le garrot est préparé avant sa mise en place de manière à former une double boucle en faisant passer les cordons en silicone dans les trous de la platine centrale.


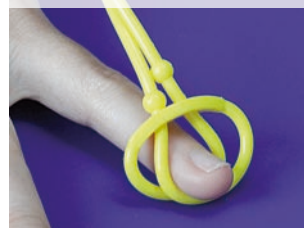


2. Le garrot ainsi préparé sera placé sur la pulpe du doigt. On tire ensuite sur les cordons en silicone pour serrer mais pas trop (laisser un peu de jeu pour l'étape [3]).

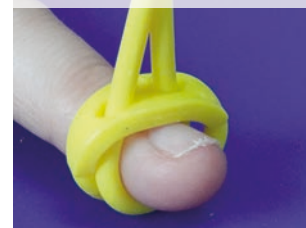


3. On remontera en roulant le FMN sur lui-même vers la base du doigt pour chasser le sang et obtenir l'exsanguination recherchée ...

Si au cours de cette manœuvre le FMN glisse sur le doigt sans s'enrouler sur lui-même, alors il se peut que le maintien de l'exsanguination ne soit pas possible. Le FMN doit s'enrouler sur lui-même comme indiqué sur la photo pour maintenir l'exsanguination pendant toute la durée de l'intervention.

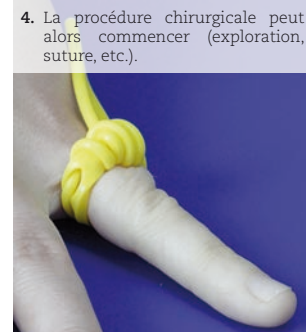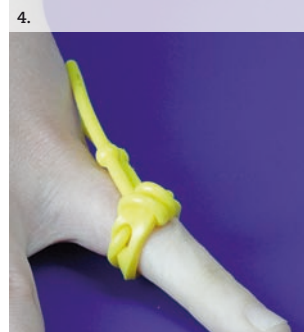

5. Ôter le FMN est facile. On tirera sur la platine centrale élargissant ainsi les trous et facilitant son démontage. Le FMN pourra être réutilisé après nettoyage et stérilisation comme pour un instrument chirurgical.

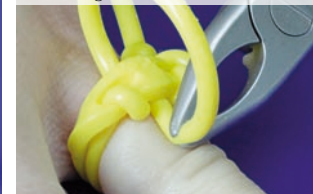

Quand il n'est pas nécessaire d'obtenir un doigt totalement exsangue, il sera possible d'utiliser une boucle simple: le bras est d'abord maintenu quelques minutes au dessus du niveau du cœur suite à quoi le FMN est mis en place directement à la base du doigt.

**NB1** - Ne pas utiliser le ForgetMeNot sur de petits doigts.

**NB2** - Ne pas utiliser le ForgetMeNot sur des enfants.

Ces deux contre-indications sont liées aux caractéristiques dimensionnelles du FMN.

**NB3** - Ne pas « clamber » le ForgetMeNot avec un instrument métallique, cela pourrait initier de petites coupures dans le silicone pouvant être à l'origine de ruptures secondaire.