

Gel[™] Silgel[®]

Merci de prendre note de ces recommandations d'utilisation.

- I. S'assurer que la surface de la compresse dépasse la zone à traiter de 2 cm tout autour.
- II. Découper deux morceaux de Compresse de Gel[™] de taille et de forme identiques. Le premier servira le premier jour, le second le jour suivant, etc.
Le découpage de la feuille se fera avec le film transparent (film polyester).
Ce film polyester (transparent) est enlevé avant application de la Compresse de Gel[™] sur la zone à traiter.
- III. Garder les films transparents, après utilisation de la Compresse de Gel[™], ils seront utilisés pour la recouvrir après que la compresse soit passée à l'eau pour la débarrasser des peaux mortes et autres débris cutanés.
Augmenter progressivement la durée de mise en place de la Compresse de Gel[™], jusqu'à la garder au minimum 12H/jour et idéalement 23 heures sur 24 heures (1H de repos par 24H).
- IV. Bien lire la notice et respecter les indications qui y sont données. Pour maintenir la Compresse de Gel[™] en place, vous pourrez acheter chez votre pharmacien un filet ou du jersey tubulaire (bien préciser le code tips suivant: 104Co2.1 ou 104Co2.2).
- V. Pour les zones exposées dos de la main et face on pourra utiliser la Crème Silgel[™] qui permet de recréer un micro climat cutané semblable à celui qui apparaît sous les Compresse de Gel[™].
- VI. Le mode d'action de ces produits n'est toujours pas clairement élucidé. Ce que l'on sait par contre est qu'il faut une application impérative de minimum 12 heures par jour pendant une durée de 2 mois minimum pour pouvoir dire si cette technique n'est pas opérante.
- VII. En étant soigneux, une feuille utilisée un jour sur deux fera la durée de ces deux mois de traitement. Si la feuille se trouve mis en place dans une zone de frottement cette durée sera réduite.
La Compresse de Gel[™] comporte dans son épaisseur un filet plastique transparent qui lui confère une grande résistance à la déchirure. La partie extérieure est constituée d'un élastomère non adhérent.

**Si vous avez des questions, n'hésitez à nous contacter,
nous vous rappellerons.**

www.arex.fr