

**Medical Adhesive B Liquid
VM 355-1**



Lot 203609

Exp. 1/2013

Description

Medical Adhesive B Liquid est un adhésif médical sensible à la pression. Il est tout particulièrement indiqué pour fixer de manière temporaire différents matériaux à la surface du corps. Medical Adhesive B Liquid offre les avantages suivants:

- Il conserve ses propriétés adhésives même au contact de l'humidité.
- Ces propriétés ne sont pas modifiées sous l'influence des variations de température.
- Elles ne s'altèrent pas non plus avec le temps.

Applications suggérées

Medical Adhesive B Liquid s'emploie comme matériau adhésif non sensibilisant pour fixer sur le corps des pansements, des prothèses ou d'autres objets en métal ou en plastique.

Mode d'emploi

Appliquer abondamment l'adhésif sur les deux surfaces à coller (sèches et sans graisse) de manière bien régulière. Lorsque les surfaces sont sèches au toucher, les réunir en les pressant. Des couches supplémentaires d'adhésif peuvent augmenter l'adhérence.

Comment enlever l'adhésif

Medical Adhesive B Liquid peut être enlevé à l'aide des alcools isopropanol ou benzine

Stockage et durée de conservation

Medical Adhesive B Liquid peut se conserver au maximum 48 mois, dans la mesure où le stockage a été effectué dans des containers absolument hermétiques à une température de 25°C ou moins.

Toxicologie

Medical Adhesive B Liquid a subi des tests de toxicité par voie orale, d'irritation oculaire et d'irritation primaire de la peau. Il a été déclaré non toxique, non irritant pour les yeux ni pour la peau. Vous trouverez de plus amples informations concernant la toxicologie de ce matériau dans la documentation de nos produits.

Précautions

L'adhésif contient comme dissolvant Ethylacetat qui peut conduire à des irritations oculaires momentanées. Il faut éviter pour cette raison des contacts. Le dissolvant peut aussi causer des irritations des voies respiratoires. Il faut éviter pour cette raison une inspiration longue et profonde et s'assurer d'une circulation d'air frais suffisante.

Indication importante

Les informations et les données indiquées ici se basent sur des informations que nous considérons comme sûres. Vous devriez cependant effectuer des tests pour tout usage de notre produit et décider en toute indépendance s'il répond à vos exigences.